

# MONTAGEHANDLEIDING

## ROLLINOVA® Rugmontage RHI200RM

*t.b.v stoel met armleggers gemonteerd aan de rugleuning*



### Inhoud van de doos:

1. Rollinova@buis
2. Framesteun compleet
3. Buis van de framesteun
4. wielsteun
5. vergrendel steun
6. Sterknop framesteun
7. Sterknop Rollinova@buis
8. Armleggermontagesteun (2x)
9. Houder voor Rollinova@buis
10. Rubber t.b.v. buis 3 (2x)

Om te fixeren zijn 5 tapbouten geplaatst in de onderdelen 2,4 en 9. In onderdeel 2 is hiervoor een inwendige inbusbout geplaatst.

### Montagegereedschap:

Sleutel 13 en inbussleutel 4.

### Let op:

Altijd alle tapbouten zodanig losdraaien dat de Rollinova@buis (1) in de onderdelen 2,4 en 9 geplaatst kan worden bij onderstaande montage!

## Volgorde van montage:

### Stap 1:

Begin aan de rechterkant van de stoel. Demonteer de opklapbare armlegger van de rugleuning van de 2 boven elkaar geplaatste bouten te verwijderen. Steek deze 2 bouten nu weer terug door de gaten van de opklapbare armlegger. Plaats aan de achterkant hiervan de armleggermontagesteun (8) over deze bouten heen. Schroef nu beide bouten weer terug in de rugleuning. Bij bouten zonder verzonken kop mag de armleggermontagesteun (8) ook tegen de buitenkant van de opklapbare armlegger worden gemonteerd.



# MONTAGEHANDLEIDING

## ROLLINOVA® Rugmontage RHI200RM

*t.b.v stoel met armleggers gemonteerd aan de rugleuning*



### Stap 2:

Plaats nu de houder voor Rollinova®buis (9) over de rechter armleggermontagesteun (8). Hierbij moeten beide tapbouten naar onder wijzen en de tapbout om de Rollinova®buis (1) in te fixeren naar rechts wijzen.

### Stap 3:

Demonteer nu de armlegger aan de linker kant en plaats dan de armleggermontagesteun (8) in de houder voor de Rollinova®buis (9). Doorloop nu alle handelingen van stap 1. En zet de opklapbare armlegger weer vast. Plaats nu de houder voor Rollinova®buis (9) in het midden van beide armleggermontagesteunen (8) en zet beide tapbouten goed vast.



**Stap 4:** Schuif, zoals afgebeeld op pagina 1, de framesteun (2) links over de Rollinova®buis (1) met hierbij de sterknop (6) naar boven gericht en de sterknop Rollinova® (7) naar achteren gericht. De plaatsing van onderdeel (3) volgt pas bij de handleiding : Rollinova® Rollatorhouder afstellen op uw rollator.

**Stap 5:** Plaats nu de Rollinova®buis (1) in de houder voor Rollinova®buis (9) en laat deze doorsteken tot de onderkant van de zitting. Draai de tapbout van de houder van Rollinova®buis (9) vast.

**Stap 6:** Schuif de wielsteun (4) zoals afgebeeld rechts over de Rollinova®buis (1). De onderkant gelijk houden met de Rollinova®buis (1) en de tapbout van de wielsteun (4) nu goed vastzetten.

*De juiste afstelling van de hoogte van de Rollinova®buis (1) in de houder (9) wordt bepaald in de aparte handleiding: Rollinova® Rollatorhouder afstellen op uw rollator.*

De Rollinova® Zittingmontage is nu gereed om éénmalig ingesteld te worden op uw rollator. De juiste hoogte van de Rollinova®buis (1) in de houder (9), hoogte van de framesteun (2) en de instelling van de buis van de framesteun (3) worden beschreven in:

***Rollinova® Rollatorhouder afstellen op uw rollator***