



## Installatie handleiding S120.333 montageset Trophy 6



Deze montageset wordt op een Trophy 6 gemonteerd. Hierdoor kunt u de rollatorhouder monteren RHI200BM. De modificatie mag alleen uitgevoerd worden door een ervaren vakman. Hier volgen aanwijzingen voor de standaard installatie.


### gereedschap

- Steeksleutel 13mm.

### Benodigd

### Plaatsing van het montage set

Verwijder het wiel van de Trophy. 10 cm voor de aandrijfvas zitten er 2 gaten in het frame (Zie foto onder). Plaats het opvulstuk op de wijze zoals op deze foto te zien is en plaats de montagesteun daar overheen. Plaats beide zeskantbouten M8 x 40 mm door de montageplaat, het opvulstukje en het gat van het frame. Bevestig aan de binnenzijde van het frame de schroefplaat en draai vanaf de buitenzijde de zeskantbouten stevig aan. Plaats het wiel met een momentsleutel zoals voorgeschreven door de fabrikant.

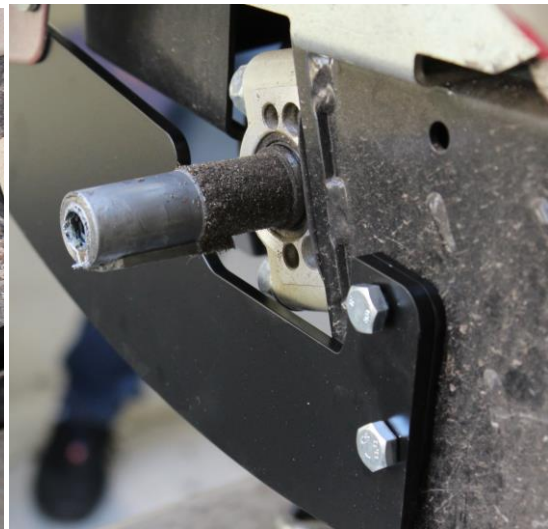

### Email ondersteuning

Als u vragen of opmerkingen heeft over het opbouwen van het montage set op deze scooter, stuur dan een email naar ons met alle relevante informatie (en foto's), zodat wij u efficiënt kunnen beantwoorden.

Warmerdam Revalidatie Service vof [info@wrsnet.nl](mailto:info@wrsnet.nl)